



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

SCALDALETTO ELETTRICO
HEATING UNDERBLANKET
CHAUFFE-LIT
AQUECEDOR DE COLCHÃO
VÄRMEUNDERFILT
VUOTEENLÄMMITIN
WÄRMEUNTERBERR
SALTEA ELECTRICĂ
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ
VYHŘÍVANÁ PODLOŽKA
PODGRZEWANY PODKŁAD
ELEKTRISCHE ONDERDEKEN

REF SS29(150*080)-1X (GIMA 28660)
SS29(160*140)-2X (GIMA 28661)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Hersteller / Κατασκευαστής
/ Producent / Výrobce / Producent / Producent / Tillverkare / Valmistaja

Dongguan Sunbright Electric Appliance Co., Ltd.

No.102, Shangdong Yiheng East Road, Qishi Town,
523455 Dongguan City, Guangdong Province, China

E-mail: Kevin@ydjie.net

Made in China

Importato da / Imported by / Importé par / Importado por / Importiert von / Εισάγεται από
/ Importowane przez / Importováno / Importat de / Importerad av / Geïmporteerd door /
Maahantuoja:

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com



Mode d'emploi

Couvertures électriques

SS29(150*080)-1X
SS29(160*140)-2X

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation et conservez-le pour de futures consultations.

INFORMATIONS IMPORTANTES ! CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE !

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'utilisation de cet appareil, en particulier les instructions de sécurité, et conservez-le pour de futures consultations.

Si vous cédez cet appareil à une autre personne, il est fondamental que ce mode d'emploi soit également cédé.



Appareil de classe II



Ce produit est conforme à la directive européenne



Suivez les instructions d'utilisation



Code produit



Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements)





Numéro de lot



Disposition DEEE



Non adapté aux enfants de moins de 3 ans

	Ne percez pas le coussin chauffant !
	N'utilisez pas plié ou froissé
	Ne séchez pas en machine
	Ne nettoyez pas à sec !
	Ne repassez pas le coussin chauffant ! Vous pouvez repasser la housse du coussin à basse température !
	Ne la javellisez pas
	Lavez en machine

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Contrôlez attentivement la couverture avant chaque utilisation.
- Si vous constatez des dommages évidents sur la couverture, ne l'utilisez pas et retournez-la au fabricant ou au vendeur.
- La couverture peut uniquement être utilisée avec le contrôleur.
- Avant de brancher la couverture à l'alimentation électrique, assurez-vous que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique soit compatible avec le réseau.
- La couverture ne doit pas être utilisée si elle est pliée, froissée, enveloppée dans un couvre-lit ou placée autour du matelas.
- Quatre sangles de fixation sont situées aux angles de la couverture. Accrochez la couverture au matelas à l'aide de ces sangles, en utilisant une bande ou une corde appropriée. Assurez-vous que la couverture est fermement attachée au matelas dans les deux directions et qu'elle ne risque pas de se froisser lors de son utilisation. Vérifiez si elle est correctement placée avant de vous y coucher.
- Lors de l'emploi, l'interrupteur du contrôleur et le câble ne doivent pas se trouver sur ou sous la couverture ou être couverts de quelque manière que ce soit.
- Avant d'utiliser la couverture sur un lit réglable, assurez-vous que le câble d'alimentation et la couverture ne se prennent pas dans les charnières ou ne se froissent pas lors des réglages.
- Ne percez pas la couverture avec des épingles de sûreté, et n'accrochez pas celles-ci ou d'autres objets pointus ou coupants au coussin.
- En particulier, n'utilisez pas la sous-couverture électrique pour des personnes infirmes, des enfants ou des personnes insensibles à la chaleur.
- De très jeunes enfants (0-3 ans) ne doivent pas l'utiliser. Les enfants de moins de trois ans ne doivent pas utiliser ce dispositif en raison de leur incapacité à réagir à la surchauffe.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec la couverture.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne laissez jamais la couverture sans surveillance.
- Une utilisation prolongée de la couverture réglée sur une température élevée peut provoquer des brûlures de la peau.
- Une utilisation prolongée de la couverture réglée sur une température élevée peut provoquer des brûlures de la peau.
- Ne touchez jamais la couverture si elle est tombée dans l'eau. Débranchez immédiatement la couverture par la prise secteur.

- Maintenez le câble secteur éloigné des surfaces chaudes.
- Ne portez, ne poussez ou ne tournez jamais la couverture par le câble secteur et ne laissez pas le câble s'emmêler.
- N'utilisez pas la couverture si elle est mouillée et utilisez-la uniquement dans des lieux secs (pas dans la salle de bains ou environnements similaires).
- Le contrôleur et le câble ne doivent être exposés à aucun type d'humidité.
- Si une panne se produit, n'essayez pas de réparer la couverture vous-même. Les réparations doivent uniquement être effectuées par un vendeur spécialiste agréé ou par du personnel dûment qualifié.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il ne peut être remplacé que par un vendeur agréé ou un électricien qualifié. Afin de prévenir les dangers, envoyez toujours la couverture au centre d'assistance.
- Laissez refroidir complètement la couverture avant de la plier et de la ranger. Ne la pliez pas trop serrée.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez la couverture selon les instructions ci-dessous :
 - Rangez la couverture dans son emballage original et placez-la dans un lieu propre et sec.
 - Pliez soigneusement le câble d'alimentation afin d'en éviter les ruptures. - Ne froissez pas la couverture en plaçant des objets par-dessus lors de son rangement.

- En cas de doutes concernant des problèmes de santé, consultez votre docteur avant d'utiliser la couverture.

- Si vous ressentez des douleurs ou de l'inconfort lors de l'utilisation de la couverture, interrompez immédiatement son emploi.

- La couverture est destinée à une utilisation privée uniquement et ne doit pas être employée dans les hôpitaux.

FONCTIONNEMENT

Il est recommandé d'allumer la couverture (en position 3) 30 minutes avant d'aller au lit.

Branchez la couverture à la prise secteur et tournez l'interrupteur de sélection du contrôleur de la position 0 à la position 1. Le voyant rouge d'alimentation s'allume. Vous sentirez la couverture se réchauffer progressivement. Cela sera encore plus évident si elle est recouverte par un couvre-lit. Si vous souhaitez une température plus élevée, tournez l'interrupteur en position 2 ou 3. Si la couverture est trop chaude, remplacez l'interrupteur en position 2 ou 1. Les positions 2 et 3 sont destinées au chauffage, seule la position 1 est destinée à un fonctionnement continu. Déplacer le sélecteur en position 1 avant de vous endormir.

Pour éteindre la couverture, remplacez l'interrupteur en position 0. Le voyant rouge d'alimentation s'éteint, indiquant que le dispositif est éteint. Vous pouvez maintenant débrancher la couverture de la prise secteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer la couverture, débranchez-la de la prise secteur et laissez-la refroidir complètement ou pendant au moins dix minutes.
- La couverture est équipée d'un câble détachable. Débranchez la fiche et retirez le câble de la couverture.
- Nettoyez délicatement la couverture à la main. Le mieux est de faire tremper la couverture dans de l'eau tiède avec un peu de détergent doux et de la sortir en la pressant.
- Ne séchez pas la couverture à l'aide d'un sèche-cheveux, elle doit sécher de manière naturelle, étendez-la sur une surface plane.
- Rincez la couverture plusieurs fois afin d'éliminer toute trace de détergent.
- Rangez la couverture dans un lieu propre et sec, en la plaçant à plat sans rien poser dessus.
- N'utilisez la couverture qu'une fois qu'elle est complètement sèche.
- Vous pouvez également laver la couverture en machine à une température maximale de 30 °C, avec une action mécanique et un essorage légers. Le lavage à la main est recommandé pour prolonger la durée de vie du produit.

CONDITIONS DE GARANTIE GIMA

La garantie appliquée est la B2B standard Gima de 12 mois



Élimination des déchets d'EEE: Ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Les utilisateurs doivent remettre leurs appareils usagés à un point de collecte approprié pour le traitement, la valorisation, le recyclage des déchets d'EEE