
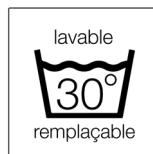


FAUTEUIL COQUILLE ELYSEE II

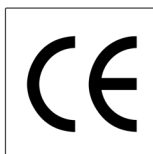

L'ELYSEE II est un fauteuil à usage intérieur / extérieur. Il peut être utilisé aussi bien à domicile qu'en collectivité. Il a été pensé pour les personnes en perte d'autonomie, assistées d'un accompagnant. Comme tous les produits INNOV'SA le dossier, l'appui tête, les accoudoirs sont composés de couettes moelleuses, amovibles, remplaçables et lavables 30° permettant un allègement des points de pression.

L'ELYSEE II est un produit Français exclusif sur le marché. Dispositif Médical de Classe B en cours d'agrément par le CERAH.

Votre fauteuil ELYSEE II est équipé de série d'une assise en mousse à mémoire de forme de type Classe II, d'un harnais et d'un appui cervical.

caractéristiques :


hygiène	modules de couettes remplaçables, amovibles et lavables à 30°
modules de couettes	remplacement aisé en cas d'usure
composition de la couette	garnie fibre creuse siliconée pour un allègement des points de pression
composition du fauteuil	- coque composée de 4 éléments bois en OSB 3 traité hydrofuge - bois d'assise recouvert d'une feuille de polypropylène
+ produit	- système de freinage par freins à tambour avec commande sur la barre de poussée - double palette repose-pieds relevables et amovibles
positions	inclinaison manuelle : Assise / Dossier / Repose jambes avec système à crémaillère.
sécurité	- Normes non-feu revêtement PVC/PU : M2 – 1021-1 – 1021-2 et biocompatible - Normes non-feu revêtement Velours et Tissus chinés : 1021-1 – 1021-2 et biocompatible
revêtements	velours déperlant, PVC/PU, tissus chinés
largeurs d'assise	38, 44, 50, 56 & 65 cm
hauteur sol / assise	48 cm
hauteur sol / dessus accoudoir	71 cm
largeur hors tout	66 cm (T4), 67 cm (T7), 73 cm (T10), 79 cm (T13), 88 cm (T16)
options disponibles	cale-tronc ajustable, tablette ventrale
poids maximum utilisateur	130 kg
poids du fauteuil	37,5 kg
garanties	fauteuil 2 ans - vérin 5 ans
franco à l'unité	oui
fabrication	France - région grand Est- Aube



FAUTEUIL ELYSEE II
dimensions en cm

largeurs d'assise	profondeurs d'assise	largeurs hors-tout	hauteur d'assise	hauteur hors-tout	poids du fauteuil	poids maxi utilisateur
380 mm	480 mm	660 mm	520 mm	1350 mm	37,5 kg	130 kg
440 mm		670 mm				
500 mm		730 mm				
560 mm		790 mm				
650 mm		880 mm				

tolérance dimensionnelle et pondérale + 15 mm / 1,5 kg

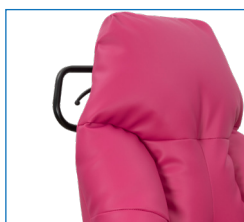
 double palette
repose-pieds rabattable

 freins à tambour à
commande manuelle

aide à l'entretien

La couette de votre fauteuil est **amovible** et peut être **lavée en machine à 30°**. Nous vous conseillons lors du lavage de placer votre couette dans un filet à linge afin de conserver leur aspect d'origine.

La durée de vie prévue du fauteuil est influencée par l'utilisation, le stockage, l'entretien et le nettoyage réguliers. Afin de garder votre fauteuil INNOV'SA en bon état, **vous devez l'entretenir régulièrement** de la manière suivante :

- Contrôler et nettoyer les roues. Remplacer celles-ci si nécessaire.
- Vérifier la fixation des vis, les leviers, les boutons de réglage.
- Contrôler les freins.
- Contrôler le fauteuil (propreté fissures, dommages sur les pièces de structure, etc.) et le nettoyer.
- Remplacer le revêtement si nécessaire.

LES COLORIS

PVC / PU imperméable
non-feu M2 🔥

- 1- ebène
- 2- cacao
- 3- framboise


velours déperlant non-feu
EN 1021.1 & 1021.2 🔥

- 4 - velours marron
- 5 - black édition


tissus chinés non-feu
EN 1021.1 & 1021.2 🔥

- 6 - gris chiné
- 7 - marron chiné

cale-tronc ajustable

tablette ventrale
