



INNOV'SA

notice d'utilisation et de montage du fauteuil

LUX

1 ou 2 moteurs



A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE UTILISATION

SYMBOLES FIGURANT DANS CE MANUEL



Avertissement

Indique une situation dangereuse susceptible de provoquer des blessures graves, voir la mort si elle n'est pas évitée.

1- NOTICE D'UTILISATION



Avant d'effectuer un cycle (monté et surtout descendre) veuillez vérifier que rien (personne, animaux, objets...) ne puissent être coincés sous la mécanique en mouvement.

CONDITION DE STOCKAGE

Le fauteuil LUX doit être stocké dans un local sec et tempéré en respectant le sens HAUT/BAS du carton.

CONDITION D'UTILISATION

Ne pas faire fonctionner cet appareil sans avoir au préalable :

- été formé à un essai pratique avec le revendeur ou son installateur,
- Lu et compris ce manuel.

Veiller à laisser une distance suffisante (environ 60 cm) derrière le fauteuil pour éviter qu'il ne vienne en contact avec le mur lorsqu'il est en position 'Relax'.

Vérifier systématiquement que rien ne puisse être bloqué ou être dissimulé sous la mécanique avant chaque cycle d'utilisation. La mécanique du fauteuil pourrait provoquer de réelles blessures. Être très vigilant avec les enfants en bas âge ou les animaux de compagnie.

S'assurer que l'emplacement du fauteuil soit une surface plane et sans déclivité pour valider la bonne stabilité du fauteuil au sol afin que votre fauteuil ne puisse pas glisser.

Ne pas placer le fauteuil à proximité d'une source de chaleur importante.

Brancher le câble alimentation sur un réseau électrique conforme aux normes en vigueur et en correspondance avec la tension du boîtier d'alimentation 230 V.

En cas de risque d'orages il est recommandé de ne pas utiliser le fauteuil. Le fauteuil releveur ne doit pas se déplacer lors de son utilisation.

Nous vous conseillons de faire un cycle à vide afin de vous familiariser avec le fauteuil.

L'utilisateur doit interdire l'utilisation de ce fauteuil par les enfants. Le repose-jambes n'est pas un siège supplémentaire.

Avant de déplacer le fauteuil : débrancher le câble d'alimentation.

En cas de tassement de votre couette. Veuillez svp détacher votre couette et la tapoter afin qu'elle retrouve son gonflant d'origine.

N'utiliser que les pièces et accessoires d'origine distribués par INNOV' SA, permettant de garantir la sécurité et de maintenir la conformité du produit.

Il est interdit de modifier le fauteuil, auquel cas la garantie ne sera plus valable.

La mauvaise utilisation du fauteuil annulera également les conditions de garantie.

Ne pas exposer le produit en pleine lumière car cela peut entraîner la décoloration partielle des revêtements.

Ne pas démonter les deux roulettes arrière

Présentation d'usage

L'usage du fauteuil LUX n'est pas destiné à des personnes désorientées et pour les utilisateurs nécessitant, l'aide et la vigilance d'une tierce personne sont impératives.

Limite de poids

Ce fauteuil releveur ne peut pas être utilisé par des personnes pesant plus de 130 kg

2 – MONTAGE DU DOSSIER ET REGLAGE DE LA PROFONDEUR D'ASSISE

Sortir le fauteuil de son carton d'emballage.

Incliner la mécanique de votre fauteuil vers l'arrière à l'aide de la télécommande.




Soulever la couette d'assise afin de bien visionner les braquettes.

2 profondeurs d'assise sont possibles : 46 cm ou 53 cm.

Pour la profondeur d'assise de 53 cm, positionner la braquette femelle (A) du dossier (photo 1) face à la braquette mâle (C) de votre base puis emboîter la braquette (C) dans la braquette (A) jusqu'au « CLIC »

Pour la profondeur d'assise de 46 cm, positionner la braquette femelle (B) du dossier (photo 2) face à la braquette mâle (C) de votre base puis emboîter la braquette (C) dans la braquette (B) jusqu'au « CLIC »

Il est possible que la braquette mâle de la base (B) soit légèrement décalée, il vous suffit juste de la « tirer » légèrement afin de la mettre face à la braquette de votre choix (46 ou 53 cm) du dossier (A). Vous pouvez à tout moment changer la profondeur de votre dossier en tirant la languette de la braquette femelle (photo 2 bis) vers l'extérieur, répéter l'opération de l'autre côté du fauteuil tout en soulevant le dossier. Repositionner ensuite le dossier à la profondeur souhaitée.

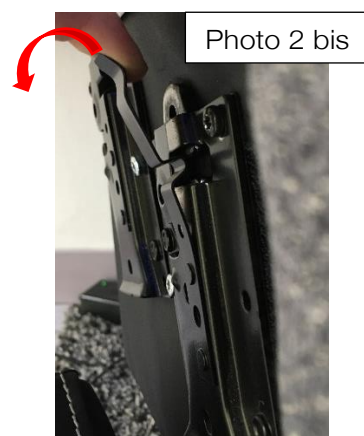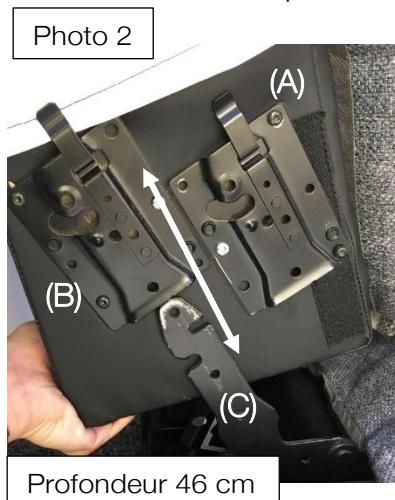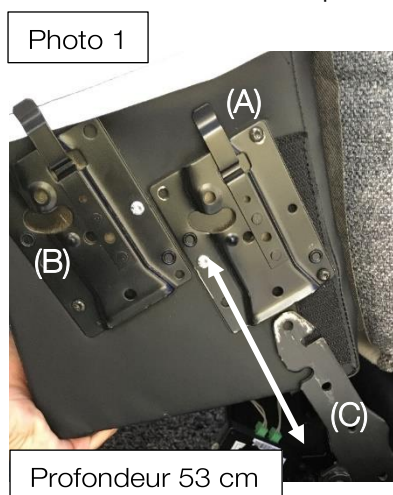

3 - MONTAGE TABLETTE

- Mettre le fauteuil LUX en position releveur (photo 3)
- Insérer le support métallique de la tablette dans l'ouverture prévue à cet effet (photo 4)
- Poser le plateau sur ce support.


Si vous souhaitez changer la tablette de côté, ôter le bouchon noir obstruant l'ouverture du côté opposé et installer votre support de tablette.



4 - UTILISATION DE LA TELECOMMANDE

Des bruits de fonctionnement peuvent être engendrés lors des changements de position de votre fauteuil (frottement des tissus, fonctionnement du moteur).

- Télécommande sécurisée et réversible
- Chute impossible grâce à son placement sous le coussin d'accoudoir.

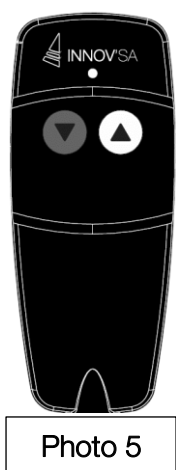

pour le LUX 1 moteur (photo 5) : télécommande deux boutons

Bouton vert : Inclinaison arrière du fauteuil avec élévation du repose-jambes

Bouton blanc : Retour du fauteuil en position assise avec abaissement du repose-jambes.

Si vous maintenez la pression, votre fauteuil passera en position releveur.

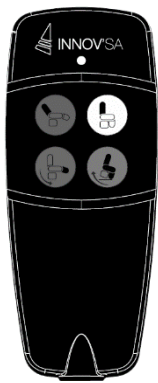


Photo 6

pour le LUX 2 moteurs (photo 6) : télécommande quatre boutons

Bouton vert : Inclinaison arrière du dossier.

Bouton blanc : Remontée du dossier en position droite.

Bouton bleu : Monté du repose-jambes. Retour du fauteuil en position assise.

Bouton jaune : Abaissement du repose-jambes. Passage en position releveur du fauteuil.




Vérifier systématiquement que rien ne puisse être bloqué ou être dissimulé sous la mécanique avant chaque cycle d'utilisation.

La mécanique du fauteuil pourrait provoquer de réelles blessures, soyez très vigilant avec les enfants en bas âge ou les animaux de compagnie.

5 - COMPOSITION DU LUX

Votre fauteuil LUX est composé des éléments ci-dessous

- 1- Un dossier
- 2- Une couette de dossier
- 3- Une assise
- 4- Un repose-jambes
- 5- Deux accotoirs
- 6- Une télécommande réversible

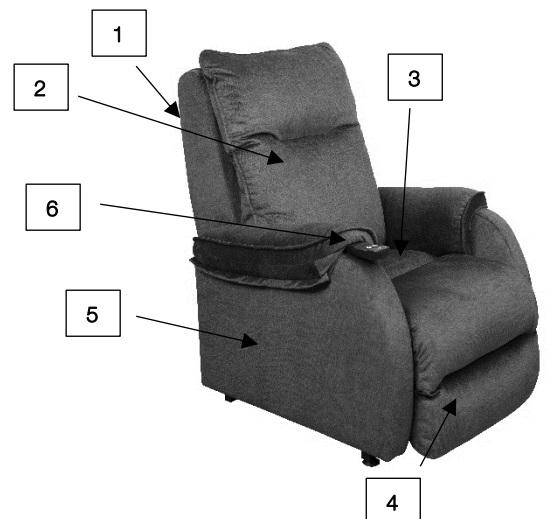

6 - ACCESSOIRES

Il est possible d'avoir les accessoires suivants en option

- Kit d'accès soulève-patient (photo 7)
- Tablette réversible G/D (photo 8)
- Kit batterie (photo 8 bis)
- Kit mobilité (photo 9) composé d'une Bride + 1 canne de déplacement
- protection de tête (photo 9 bis)

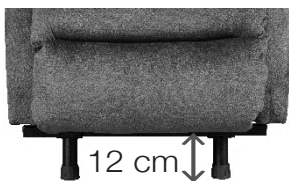


Photo 7



Photo 8



Photo 8 bis



Photo 9 bis

7- CHANGEMENT DE MODULE DE COUETTES POUR LAVAGE OU REMPLACEMENT

couette dossier

- Enlever le velcro du rabat de la couette situé sur le dos du dossier
- Enlever la fermeture éclair reliant la couette de dossier et la couette assise / repos-jambes.

couette assise / repose-jambes

- Enlever les velcros situés au fond de l'assise.
- Enlever la fermeture éclair reliant la couette de dossier et la couette assise / repos-jambes.

Tous les modules peuvent être lavés en machine. Nous vous conseillons de placer ces couettes lors de leur lavage, dans un filet à linge ou une taie d'oreiller, afin de préserver leur aspect d'origine.



PROTOCOLE DE NETTOYAGE POUR LES REVETEMENTS DU LUX

- Tous les détergents, solvants et détachants du commerce, ne figurant pas dans le NF collectivités, sont à **PROSCRIRE IMPERATIVEMENT**
- Les tâches d'encre de stylos à bille, demandent un nettoyage immédiat afin d'éviter la migration dans le tissu enduit et devenir ainsi définitives.

8- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids maxi utilisateur	130 kg (1 et 2 moteurs)	CE
Revêtements	100 % Polyester : Coloris Rubis, Saphir, Galène, Ambre	
Garniture des couettes	Fibre creuse siliconée	

Conditions de Garanties

Mécanique et moteur : 5 ans

Fauteuil : 2 ans

La garantie du fauteuil concerne tout vice de construction résultant d'un défaut de matière ou de fabrication pendant une durée de 2 ans, à partir du jour de livraison.

La date d'achat doit être inscrite sur le certificat inclus dans ce guide (page 9).

De par cette garantie nous vous proposons uniquement la remise en état ou l'échange gratuit des pièces reconnues défectueuses après accord de INNOV'SA. Nous tenons à préciser que cette remise en état ou cet échange ne pourra être effectué avec des pièces neuves, des sous-ensembles neufs ou un échange standard des dites pièces qu'après appréciation de INNOV'SA.

Nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts provoqués par un montage et/ou une réparation inadéquate ou incorrecte et non conforme, par la négligence et l'usure ainsi que par des modifications des composants ou des éléments par l'utilisateur ou par un tiers. Dans ces cas, notre responsabilité de fabricant ne pourra être engagée.

La garantie ne couvre pas l'usure normale des garnitures, des roues, des tubes (en caoutchouc), etc. les dommages résultant de l'usage de la force ou d'une utilisation non-conforme ne sont pas couverts. Les dommages causés par les utilisateurs pesant plus que le poids maximum autorisé pour chaque modèle de fauteuil sont exclus de la garantie. La garantie n'est valable que si les instructions de maintenance sont scrupuleusement respectées.

Conformités

Fauteuil répondant aux normes CEM 2014/30/EU – Directive courant faible 2014/35/EU – RoHS Directive 2011/65/EU

Normes appliquées :

- EN 60335-1:2012/A11:2014
- EN 55014-1:2006/A2 :2011
- EN 55014-2:1997/A2 :2008
- EN 61000-3-2 :2014
- EN 61000-3-3 :2013
- EN 61000-3-3 :2008
- EN 62233:2008

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nom : _____

Prénom : _____

Adresse : _____

Code Postal : _____

Ville : _____

Date d'achat : _____

afin de valider votre garantie, la date d'achat doit être obligatoirement indiquée


Modèle : _____

Numéro de Série : _____

cachet du distributeur

NOTES

découvrez le fauteuil LUX sur notre site www.innov-sa.com ou en scannant ce QR CODE

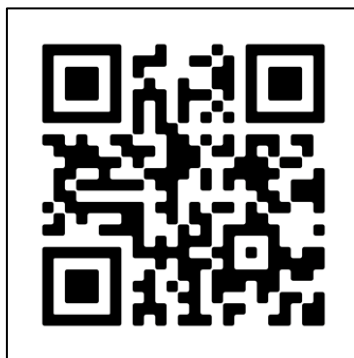



INNOV'SA

18 rue Emile Coué 10000 TROYES – FRANCE
Tel: +33(0)3 25 29 40 00 - Fax: +33(0)3 25 29 12 12
Web: www.innov-sa.com - Email: jnnovsa@innovsa.com

ATTENTION



- Ne pas laisser les enfants jouer avec le fauteuil
- Toujours laisser le fauteuil et le repose jambes fermés après utilisation
- Garder vos mains et pieds à l'écart du mécanisme
- Seul l'utilisateur doit actionner le fauteuil
- Placer le fauteuil LUX au minimum à 60 cm du mur

Notice à conserver